



VOUS POUVEZ LE VOIR

N'IMPORTE OÙ, N'IMPORTE QUAND*

Les patients peuvent partager facilement leurs données de glucose pour des conversations plus productives sur la prise en charge du diabète avec vous à distance


FreeStyle
Libre
 SYSTÈME FLASH DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE


*life. to the fullest.**
Abbott

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les adultes de 18 ans ou plus atteints de diabète. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

L'appli FreeStyle LibreLink est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli.


* Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.LibreView.com pour en savoir plus.

Les patients peuvent vérifier leur glucose avec l'appli FreeStyle LibreLink*, et vous voyez leurs données avec LibreView†



Pratique pour vos patients

Les patients peuvent vérifier facilement leur glucose en utilisant l'appli FreeStyle LibreLink ou leur lecteur FreeStyle Libre, ou les deux

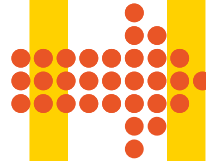

LibreView



Pratique pour vous

Les données de glucose des patients sont automatiquement téléversées‡ du téléphone à LibreView – pas besoin de personnel pour télécharger les données



* L'appli FreeStyle LibreLink et le lecteur FreeStyle Libre ont des caractéristiques similaires, mais pas identiques. La réalisation d'un test par prélèvement au doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie est nécessaire au moment des fluctuations rapides de la glycémie où le taux de glucose dans le liquide interstitiel ne reflète pas toujours exactement le taux de glucose sanguin, ou si l'appli FreeStyle LibreLink indique une hypoglycémie ou l'imminence d'une hypoglycémie, ou en cas de non-concordance des symptômes avec les lectures faites par l'appli FreeStyle LibreLink. Le capteur FreeStyle Libre communique avec le lecteur FreeStyle Libre ou l'appli FreeStyle LibreLink qui a servi à le démarrer. Un capteur démarré avec le lecteur FreeStyle Libre communiquera aussi avec l'appli FreeStyle LibreLink. L'appli FreeStyle LibreLink est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink requiert l'inscription à LibreView.

† Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.LibreView.com pour en savoir plus.

‡ L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink requiert l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.

Génère des rapports de glucose sur demande afin de soutenir une prise en charge efficace du diabète



Facile à télécharger

Les données de glucose sont automatiquement téléversées* de l'appli FreeStyle LibreLink des patients vers LibreView et peuvent être téléversées manuellement du lecteur FreeStyle Libre




Accessible à distance

Connectez-vous et visualisez des rapports standardisés à partir de tout ordinateur disposant d'une connexion Internet



Sûr et fiable

Les données de glucose sont accessibles en ligne par l'intermédiaire d'un système infonuagique sécurisé sans frais

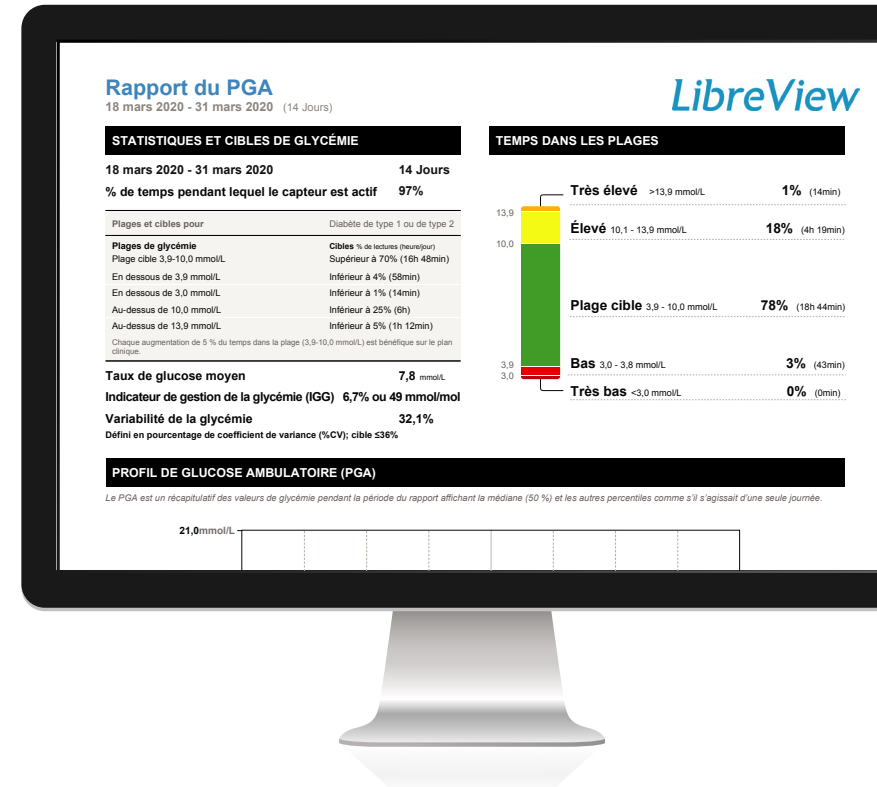

Remarque : l'illustration montre quelques-uns des rapports LibreView. Vous trouverez les rapports complets sur LibreView.com.

Les patients peuvent utiliser l'appli FreeStyle LibreLink pour partager facilement leurs données de glucose avec vous à distance



SE CONNECTER À UNE CLINIQUE VIRTUELLE
avec l'appli FreeStyle LibreLink

Se connecter à une clinique virtuelle est une fonction de l'appli FreeStyle LibreLink qui permet aux patients de partager facilement leurs données de glucose avec votre cabinet par l'intermédiaire de LibreView



Un outil en ligne sécurisé pour visualiser les données de glucose des patients

Les données de glucose de vos patients sont automatiquement téléversées* vers LibreView – un système infonuagique qui vous permet d'accéder à des rapports sur demande



LibreView

Connexion facile

Les patients peuvent établir eux-mêmes la connexion ou encore accepter une invitation de votre part

Pratique pour vous

Dès la connexion établie, les données de glucose des patients sont automatiquement téléversées* de l'appli FreeStyle LibreLink vers LibreView – pas besoin de personnel pour télécharger les données

Visites cliniques virtuelles

Accès facile aux rapports de glucose pour des décisions de traitement plus éclairées et des conversations plus productives



À des fins de présentation seulement. Données d'un patient fictif.

* L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink requiert l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.

Il est facile d'inviter les patients à partager automatiquement leurs données de glucose avec votre clinique virtuelle

Option 1 : À partir de LibreView, invitez les patients à se connecter

1. Cherchez un patient ou cliquez sur l'icône « Ajouter patient » dans le haut de la barre de navigation
2. Dans le profil du patient, sélectionnez « Inviter » et utilisez le courriel associé au compte
3. Le patient reçoit l'invitation dans son appli FreeStyle LibreLink et son courriel

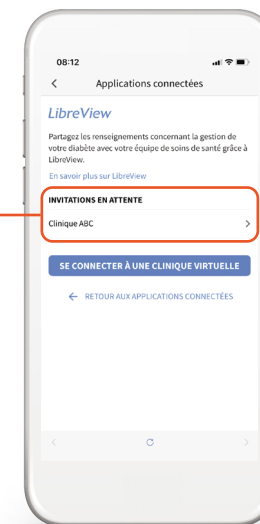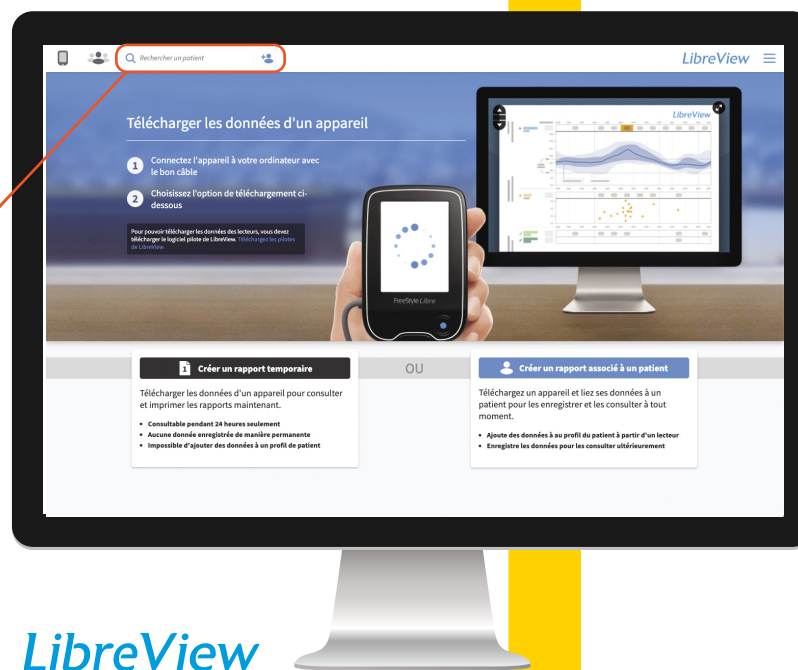

Le patient accepte l'invitation à partir de l'appli FreeStyle LibreLink ou de son courriel





Besoin d'aide? Appelez le Service à la clientèle d'Abbott destiné aux professionnels de la santé au 1-844-610-1001 ou visitez la section « Soutien client » au www.LibreView.com

Donnez à vos patients votre identifiant de clinique virtuelle LibreView afin de permettre facilement le partage de leurs données à partir de leur l'appli FreeStyle LibreLink

Option 2 :
Les patients permettent le partage de leurs données avec votre clinique virtuelle

Fournissez à vos patients votre identifiant de clinique virtuelle, qui est disponible dans LibreView sous « Mes cliniques virtuelles »

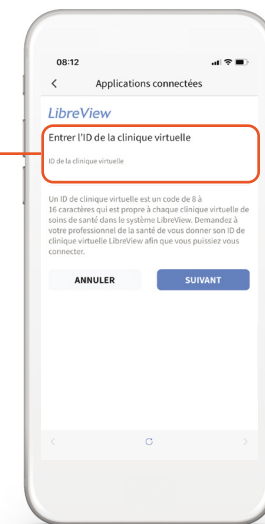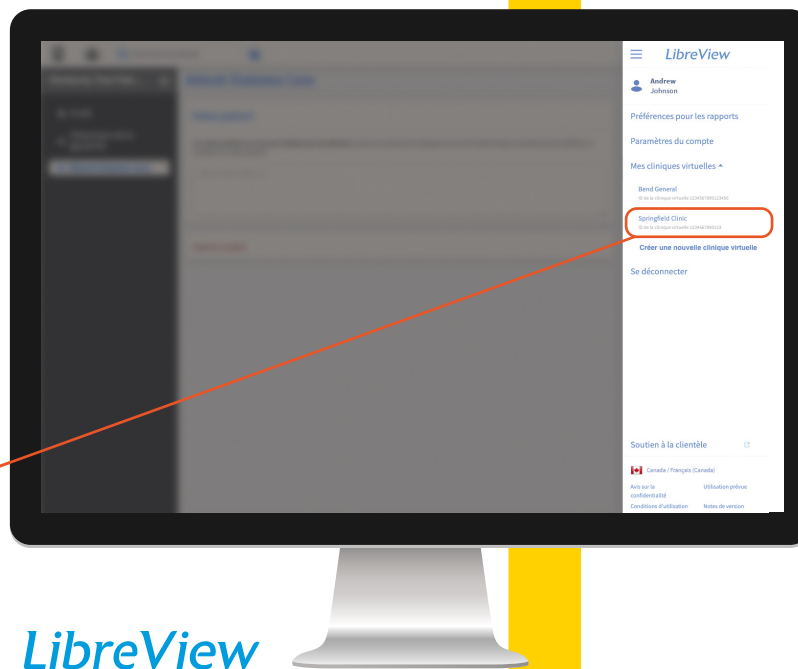

Les patients entrent l'identifiant de clinique virtuelle dans l'appli FreeStyle LibreLink pour établir la connexion



Besoin d'aide? Appelez le Service à la clientèle d'Abbott destiné aux professionnels de la santé au 1-844-610-1001 ou visitez la section « Soutien client » au www.LibreView.com



VOUS POUVEZ LE VOIR

N'IMPORTE OÙ, N'IMPORTE QUAND*



Les patients peuvent partager leurs données de glucose pour des conversations plus productives avec vous à distance

- Il est facile pour les patients de partager leurs données de glucose vers votre clinique virtuelle par l'intermédiaire de LibreView sans frais
- Les données de glucose sont automatiquement téléversées† de l'appli FreeStyle LibreLink des patients vers LibreView et peuvent être téléversées manuellement du lecteur FreeStyle Libre
- Utilisez les rapports LibreView pour voir les schémas et les tendances de glucose de vos patients afin de soutenir une prise en charge efficace du diabète



Recommandez l'appli FreeStyle LibreLink et gardez facilement le contact avec vos patients grâce à LibreView


**FreeStyle
Libre**
SYSTÈME FLASH DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE


life. to the fullest.®
Abbott

* Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.LibreView.com pour en savoir plus.

† L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink requiert l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.

© 2021 Abbott. FreeStyle, Libre, et les marques connexes appartiennent à Abbott. Les images des produits ne servent qu'à des fins de présentation. Les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.