



# LES PATIENTS PEUVENT LE FAIRE À DISTANCE



Les patients peuvent partager facilement leurs données de glucose pour des conversations plus productives sur la prise en charge du diabète avec vous à distance



Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les adultes de 18 ans ou plus qui sont atteints de diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.


# Les patients peuvent vérifier leur glucose avec l'appli FreeStyle LibreLink\*, et vous voyez leurs données avec LibreView†



**FreeStyle LibreLink**

**Pratique pour vos patients**

Les patients peuvent vérifier facilement leur glucose en utilisant l'appli FreeStyle LibreLink ou leur lecteur FreeStyle Libre, ou les deux

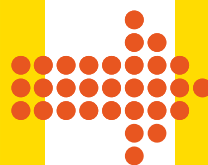

**LibreView**

**Pratique pour vous**

Les données de glucose des patients sont automatiquement téléversées‡ de l'appli FreeStyle LibreLink vers LibreView — nul besoin de personnel administratif pour télécharger les données



\* L'appli FreeStyle LibreLink et le lecteur FreeStyle Libre ont des caractéristiques similaires, mais pas identiques. La réalisation d'un test par prélèvement au doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie est nécessaire au moment des fluctuations rapides de la glycémie où le taux de glucose dans le liquide interstitiel ne reflète pas toujours exactement le taux de glucose sanguin, ou si l'appli FreeStyle LibreLink indique une hypoglycémie ou l'imminence d'une hypoglycémie, ou en cas de non-concordance des symptômes avec les lectures faites par l'appli FreeStyle LibreLink. Le capteur FreeStyle Libre communique avec le lecteur FreeStyle Libre ou l'appli FreeStyle LibreLink qui a servi à le démarrer. Un capteur démarré avec le lecteur FreeStyle Libre communiquera aussi avec l'appli FreeStyle LibreLink. L'appli FreeStyle LibreLink n'est compatible qu'avec certains dispositifs mobiles et systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink nécessite l'inscription à LibreView.

† LibreView est mis au point, distribué et soutenu par Newyu, inc. Le logiciel de gestion de données LibreView est destiné à la fois aux patients et aux professionnels de la santé pour aider des personnes atteintes de diabète et leurs professionnels de la santé dans l'examen, l'analyse et l'évaluation des données historiques du lecteur de glucose afin de soutenir une prise en charge efficace du diabète. Le logiciel LibreView ne vise aucunement à fournir des décisions de traitement ni à remplacer les conseils d'un professionnel de la santé.

‡ L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink nécessite l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet ou une connexion de données mobiles.

# Génère des rapports de glucose sur demande afin de soutenir une prise en charge efficace du diabète



## Facile à télécharger

Les données de glucose sont automatiquement téléversées\* de l'appli FreeStyle LibreLink des patients vers LibreView et peuvent être téléversées manuellement du lecteur FreeStyle Libre




## Accessible à distance

Connectez-vous et visualisez des rapports standardisés à partir de tout ordinateur disposant d'une connexion Internet



## Sûr et fiable

Les données de glucose sont accessibles en ligne par l'intermédiaire d'un système infonuagique sécurisé sans frais

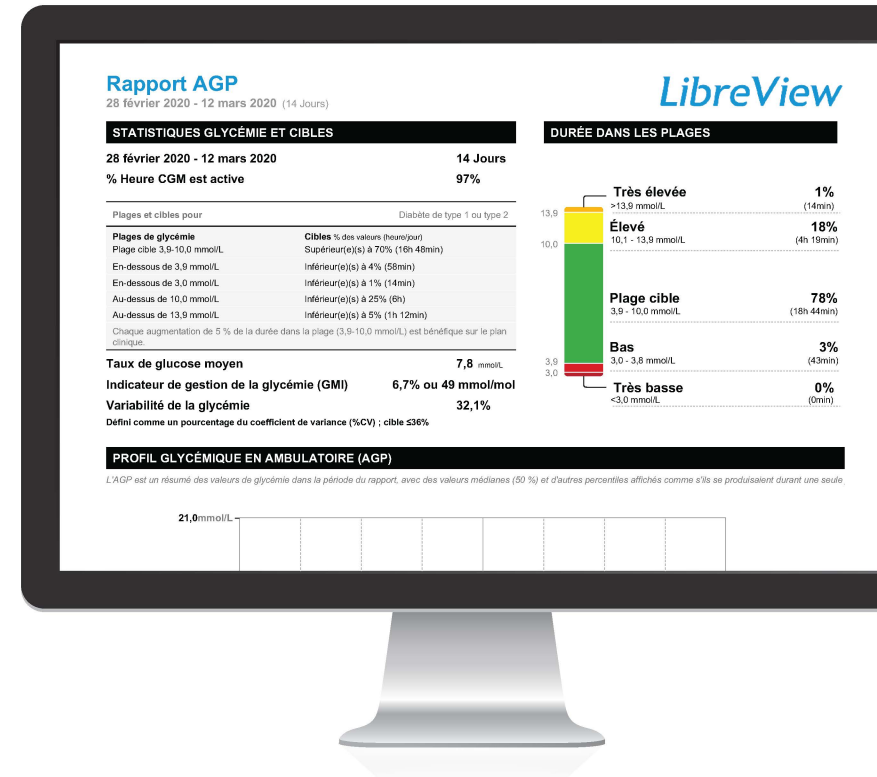

Remarque : sélectionnez des rapports LibreView montrés ici — rapports exhaustifs disponibles au LibreView.com


# Les patients peuvent utiliser l'appli FreeStyle LibreLink pour partager facilement leurs données de glucose avec vous à distance



**SE CONNECTER À UNE CLINIQUE VIRTUELLE**  
avec l'appli FreeStyle LibreLink

Se connecter à une clinique virtuelle est une fonction de l'appli FreeStyle LibreLink qui permet aux patients de partager facilement leurs données de glucose avec votre cabinet par l'intermédiaire de LibreView

  
FreeStyle  
LibreLink

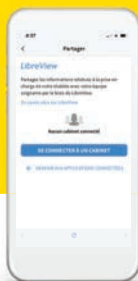

**Un outil en ligne sécurisé pour visualiser les données de glucose des patients**

Les données de glucose de vos patients sont automatiquement téléversées\* vers LibreView — un système infonuagique qui vous permet d'accéder à des rapports sur demande



LibreView



## Connexion facile

Les patients peuvent établir eux-mêmes la connexion ou encore accepter une invitation de votre part

## Pratique pour vous

Dès la connexion établie, les données de glucose des patients sont automatiquement téléversées\* de l'appli FreeStyle LibreLink vers LibreView — nul besoin de personnel administratif pour télécharger les données

## Visites cliniques virtuelles

Accès facile aux rapports de glucose pour des décisions de traitement plus éclairées et des conversations plus productives

À des fins de présentation seulement. Données d'un patient fictif.


\* L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink nécessite l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet ou une connexion de données mobiles.

# Il est facile d'inviter les patients à partager automatiquement leurs données de glucose avec votre clinique virtuelle

## Option 1 :

À partir de LibreView, invitez les patients à se connecter

1. Cherchez un patient ou cliquez sur l'icône « Ajouter patient » dans le haut de la barre de navigation
2. Dans le profil du patient, sélectionnez « Inviter » et utilisez le courriel associé au compte
3. Le patient reçoit l'invitation dans son appli FreeStyle LibreLink et son courriel

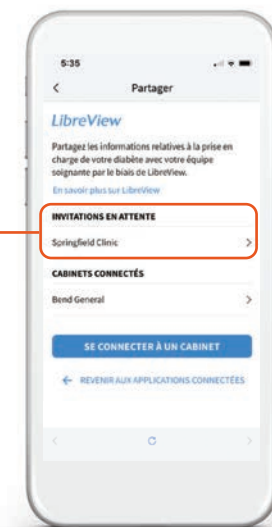

Le patient accepte l'invitation à partir de l'appli FreeStyle LibreLink ou de son courriel




**Besoin d'aide? Appelez le Service à la clientèle d'Abbott destiné aux professionnels de la santé au 1 844 610 1001 ou visitez la section « Soutien client » au [www.LibreView.com](http://www.LibreView.com)**

# Donnez à vos patients votre identifiant de clinique virtuelle LibreView afin de permettre facilement le partage de leurs données à partir de leur l'appli FreeStyle LibreLink

Option 2 :  
Les patients permettent le partage de leurs données avec votre clinique virtuelle

Fournissez à vos patients votre identifiant de clinique virtuelle, qui est disponible dans LibreView sous « Mes cabinets »

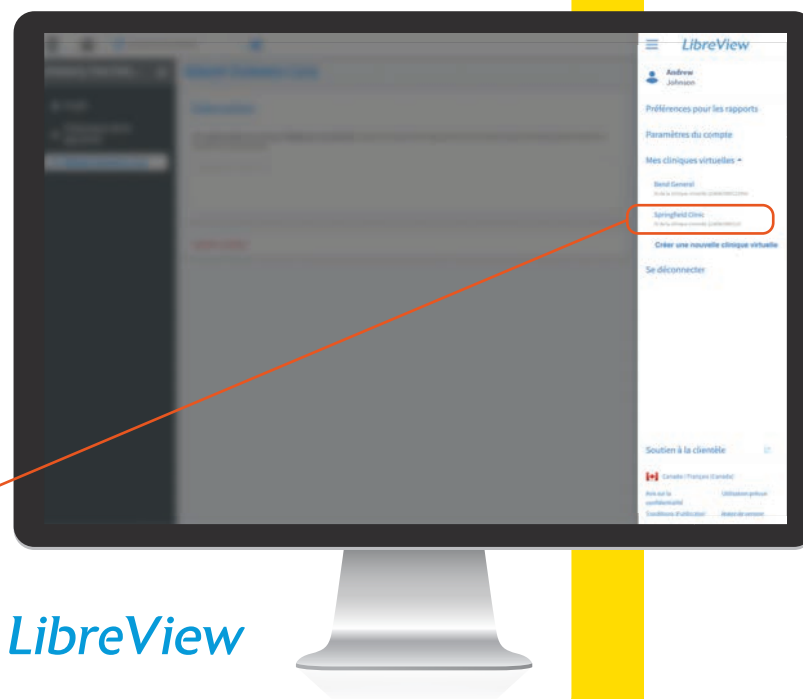

Les patients entrent l'identifiant de clinique virtuelle dans l'appli FreeStyle LibreLink pour établir la connexion



**Besoin d'aide? Appelez le Service à la clientèle d'Abbott destiné aux professionnels de la santé au 1 844 610 1001 ou visitez la section « Soutien client » au [www.LibreView.com](http://www.LibreView.com)**



# LES PATIENTS PEUVENT LE FAIRE À DISTANCE



Les patients peuvent partager leurs données de glucose pour des conversations plus productives avec vous à distance

- Il est facile pour les patients de partager leurs données de glucose vers votre clinique virtuelle par l'intermédiaire de LibreView sans frais
- Les données de glucose sont automatiquement téléversées\* de l'appli FreeStyle LibreLink des patients vers LibreView et peuvent être téléversées manuellement du lecteur FreeStyle Libre
- Utilisez les rapports LibreView pour voir les schémas et les tendances de glucose de vos patients afin de soutenir une prise en charge efficace du diabète



**Recommandez l'appli FreeStyle LibreLink et gardez facilement le contact avec vos patients grâce à LibreView**



\* L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink nécessite l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet ou une connexion de données mobiles.

© 2020 Abbott. FreeStyle, Libre, et les marques connexes sont des marques de commerce d'Abbott Soins du diabète, inc. dans différents pays. Les images des produits ne servent qu'à des fins de présentation. Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.