

POURQUOI PIQUER QUAND ON PEUT SCANNER*?

Utilisez l'appli **FreeStyle LibreLink** pour partager facilement vos données de glucose avec votre fournisseur de soins de santé.



Option 1 : Connectez-vous à la clinique virtuelle de votre fournisseur de soins de santé

Demandez à votre fournisseur de soins de santé ou au personnel de son cabinet de vous fournir l'identifiant de son compte LibreView, qui est un code unique à la clinique virtuelle de votre fournisseur de soins de santé.

Puis, entrez simplement l'identifiant dans l'appli FreeStyle LibreLink.

Allez au :

Menu > Applications connectées > LibreView >

Se connecter à une clinique virtuelle > Entrer l'ID de la clinique virtuelle

Cliquez sur **Suivant** et ensuite sur **Se connecter** après avoir pris connaissance de l'information de contact de la clinique virtuelle de votre fournisseur de soins de santé.



Option 2 : Acceptez l'invitation de votre fournisseur de soins de santé

Vous recevrez de votre fournisseur de soins de santé une invitation par courriel à partager vos données de glucose. Vous pouvez accepter l'invitation de deux façons :

1. Cliquez sur « Accepter l'invitation » dans le courriel
2. Acceptez l'invitation directement dans l'appli FreeStyle LibreLink

Allez au :

Menu > Applications connectées > LibreView > Invitations en attente > Accepter



Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle d'Abbott, au **1-888-205-8296**, ou visitez le **www.LibreView.com** et cliquez sur **Support client**.



life. to the fullest.®

Abbott

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les adultes de 18 ans ou plus qui sont atteints de diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice. Les caractéristiques de l'application FreeStyle LibreLink et du lecteur FreeStyle Libre sont similaires, mais elles ne sont pas identiques. La réalisation d'un test par prélèvement au doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie est nécessaire au moment des fluctuations rapides de la glycémie où le taux de glucose dans le liquide interstitiel ne reflète pas toujours exactement le taux de glucose sanguin, ou si le système indique une hypoglycémie ou l'imminence d'une hypoglycémie, ou en cas de non-concordance des symptômes avec les lectures faites par l'appli. Le capteur FreeStyle Libre communique avec le lecteur FreeStyle Libre ou l'appli FreeStyle LibreLink qui a servi à le démarrer. Un capteur démarré par le lecteur FreeStyle Libre communiquera aussi avec l'appli FreeStyle LibreLink. L'appli FreeStyle LibreLink est seulement compatible avec certains appareils mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des appareils avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink requiert l'inscription à LibreView.

* La réalisation d'un test par prélèvement au doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie est nécessaire au moment des fluctuations rapides de la glycémie où le taux de glucose dans le liquide interstitiel ne reflète pas toujours exactement le taux de glucose sanguin, ou si le système indique une hypoglycémie ou l'imminence d'une hypoglycémie, ou en cas de non-concordance des symptômes avec les lectures faites par le système.

Commencez par créer un compte LibreView



FreeStyle
Libre

SYSTÈME FLASH DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE

Si vous scannez votre capteur à l'aide du lecteur FreeStyle Libre, vous devez **D'ABORD** créer un compte LibreView pour partager vos données.

- Allez au www.LibreView.com*
- Cliquez sur **Inscription**
- Sélectionnez le **Compte LibreView pour les patients** et suivez les instructions à l'écran
- **Connectez** votre lecteur FreeStyle Libre
- Appuyez sur **Téléverser les données d'un appareil** et suivez les instructions à l'écran



Il existe deux moyens simples de partager vos données avec votre professionnel de la santé.

Option 1



- 1 Demandez à votre professionnel de la santé de **vous inviter** à partager vos données.
- 2 Vous recevrez un courriel vous invitant à partager vos données. **Acceptez l'invitation** et vous serez dirigé vers le site Web de **LibreView**.
- 3 Connectez-vous à votre compte **LibreView**.

Option 2

- 1 Demandez à votre professionnel de la santé de vous fournir son **ID de clinique virtuelle**.
- 2 Connectez-vous à votre compte **LibreView**. Cliquez sur l'icône ≡ dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez **Paramètres du compte**.
- 3 Cliquez sur **Mes cliniques virtuelles**.
- 4 Entrez l'ID de la clinique virtuelle de votre professionnel de la santé.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle d'Abbott, au **1-888-205-8296**, ou visitez le **www.LibreView.com** et cliquez sur **Support client**.



life. to the fullest.®

Abbott

LibreView est mis au point, distribué et soutenu par Newyu, inc. Le logiciel de gestion de données LibreView est destiné à la fois aux patients et aux professionnels de la santé pour aider des personnes atteintes de diabète et leurs professionnels de la santé dans l'examen, l'analyse et l'évaluation des données historiques du lecteur de glucose afin de soutenir une prise en charge efficace du diabète. Le logiciel LibreView ne vise aucunement à fournir des décisions de traitement ni à remplacer les conseils d'un professionnel de la santé. * Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.LibreView.com pour en savoir plus.

© 2022 Abbott. FreeStyle, Libre, et les marques connexes appartiennent à Abbott. Les images des produits ne servent qu'à des fins de présentation. Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.