




VOUS POUVEZ LE VOIR

N'IMPORTE OÙ*, N'IMPORTE QUAND†

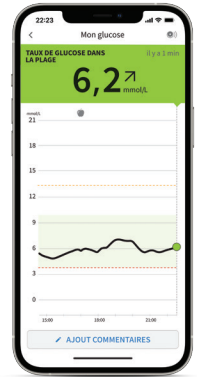

Les patients peuvent partager facilement leurs données de glucose pour des conversations plus productives sur la gestion du diabète avec vous à distance


FreeStyle
Libre 2
SYSTÈME FLASH DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE


life. to the fullest.®
Abbott

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus atteintes de diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.


L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli.

* Le capteur est résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre (3 pieds) de profondeur.

Ne pas l'immerger pendant plus de 30 minutes. Ne pas l'utiliser à plus de 10 000 pieds.

† Le capteur a besoin d'une période de réchauffement de 60 minutes lors de son application.

Les patients peuvent vérifier leur glucose avec l'appli FreeStyle Libre 2*, et vous voyez leurs données avec LibreView†

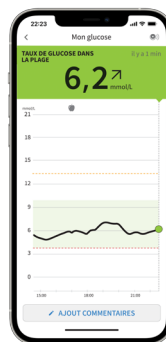


Pratique pour vos patients

Les patients peuvent facilement mesurer leur taux de glucose au moyen de l'appli ou du lecteur FreeStyle Libre 2‡



LibreView

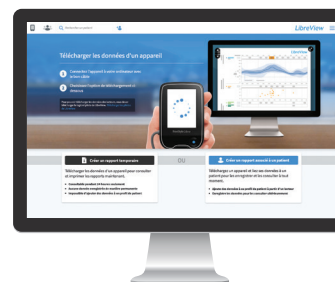

Pratique pour vous

Les données de glucose des patients sont automatiquement téléversées§ du téléphone à LibreView – pas besoin de personnel pour télécharger les données



* L'appli FreeStyle Libre 2 et le lecteur FreeStyle Libre 2 ont des caractéristiques similaires, mais pas identiques. La réalisation d'un test par prélèvement au doigt est nécessaire en cas de non-concordance des symptômes ou des attentes avec les lectures du système. Le capteur FreeStyle Libre 2 communique avec le lecteur FreeStyle Libre 2 ou l'appli FreeStyle Libre 2 qui a servi à le démarrer. L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 requiert l'inscription à LibreView.

† Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.LibreView.com pour en savoir plus.

‡ L'appli FreeStyle Libre 2 et le lecteur FreeStyle Libre 2 sont uniquement compatibles avec le capteur FreeStyle Libre 2. Les patients qui utilisent le capteur FreeStyle Libre doivent le jumeler à l'appli FreeStyle LibreLink ou au lecteur FreeStyle Libre.

§ L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 requiert l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.

Génère des rapports de glucose sur demande afin de soutenir une gestion efficace du diabète



Facile à télécharger

Les données de glucose sont automatiquement téléversées* de l'appli FreeStyle Libre 2 des patients vers LibreView et peuvent être téléversées manuellement du lecteur FreeStyle Libre 2




Accessible à distance

Connectez-vous et visualisez des rapports standardisés à partir de tout ordinateur disposant d'une connexion Internet



Sûr et fiable

Les données de glucose sont accessibles en ligne par l'intermédiaire d'un système infonuagique sécurisé sans frais

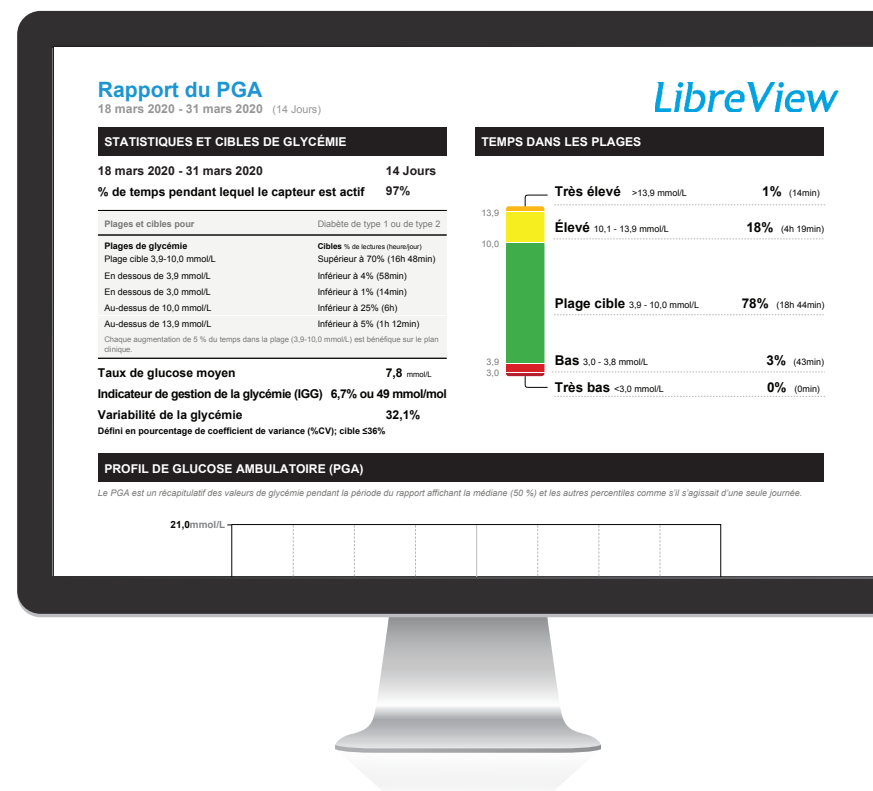

Remarque : l'illustration montre quelques-uns des rapports LibreView. Vous trouverez les rapports complets sur LibreView.com.

Les patients peuvent utiliser l'appli FreeStyle Libre 2 pour partager facilement leurs données de glucose avec vous à distance





SE CONNECTER À UNE CLINIQUE VIRTUELLE avec l'appli FreeStyle Libre 2

Se connecter à une clinique virtuelle est une fonction de l'appli FreeStyle Libre 2 qui permet aux patients de partager facilement leurs données de glucose avec votre cabinet par l'intermédiaire de LibreView



Un outil en ligne sécurisé pour visualiser les données de glucose des patients

Les données de glucose de vos patients sont automatiquement téléversées* vers LibreView – un système infonuagique qui vous permet d'accéder à des rapports sur demande

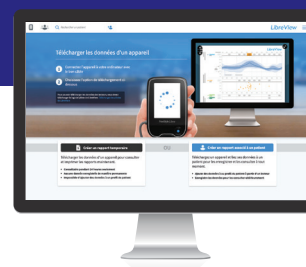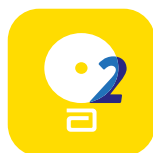

LibreView

Connexion facile

Les patients peuvent établir eux-mêmes la connexion ou encore accepter une invitation de votre part

Pratique pour vous

Dès la connexion établie, les données de glucose des patients sont automatiquement téléversées* de l'appli FreeStyle Libre 2 vers LibreView – nul besoin de personnel administratif pour télécharger les données

Visites cliniques virtuelles


Accès facile aux rapports de glucose pour des décisions de traitement plus éclairées et des conversations plus productives

Il est facile d'inviter les patients à partager automatiquement leurs données de glucose avec votre clinique virtuelle

Option 1 :

À partir de LibreView, invitez les patients à se connecter

1. Cherchez un patient ou cliquez sur l'icône « Ajouter patient » dans le haut de la barre de navigation
2. Dans le profil du patient, sélectionnez « Inviter » et utilisez le courriel associé au compte
3. Le patient reçoit l'invitation dans son appli FreeStyle Libre 2 et son courriel

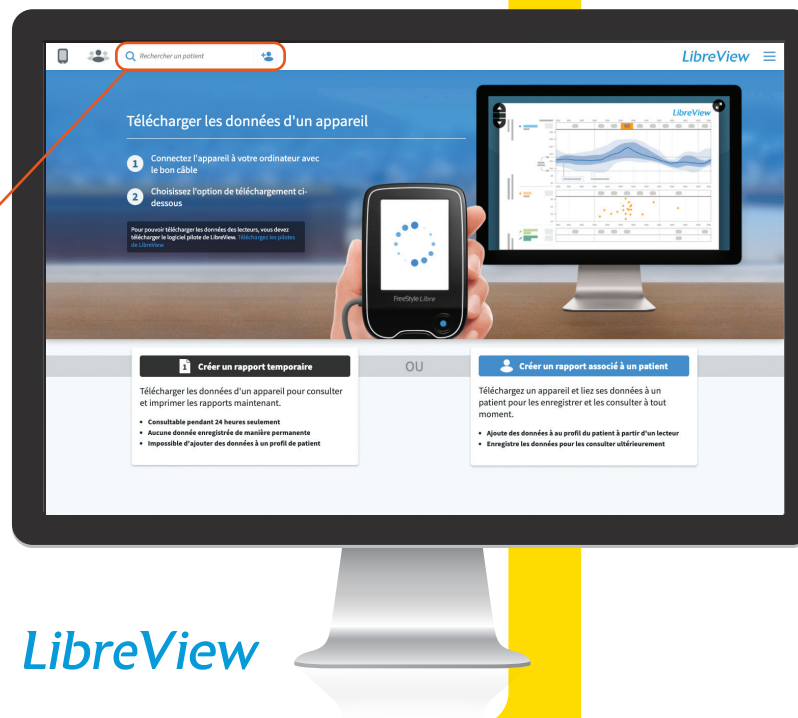

Le patient accepte l'invitation à partir de l'appli FreeStyle Libre 2 ou de son courriel




Besoin d'aide? Appelez le Service à la clientèle d'Abbott destiné aux professionnels de la santé au 1-844-610-1001 ou visitez la section « Soutien client » au www.LibreView.com

Donnez à vos patients votre identifiant de clinique virtuelle LibreView afin de permettre facilement le partage de leurs données à partir de l'appli FreeStyle Libre 2

Option 2 :
Les patients
permettent le
partage de leurs
données avec votre
clinique virtuelle

Fournissez à vos patients
votre identifiant de clinique
virtuelle, qui est disponible
dans LibreView sous
« Mes cliniques virtuelles »

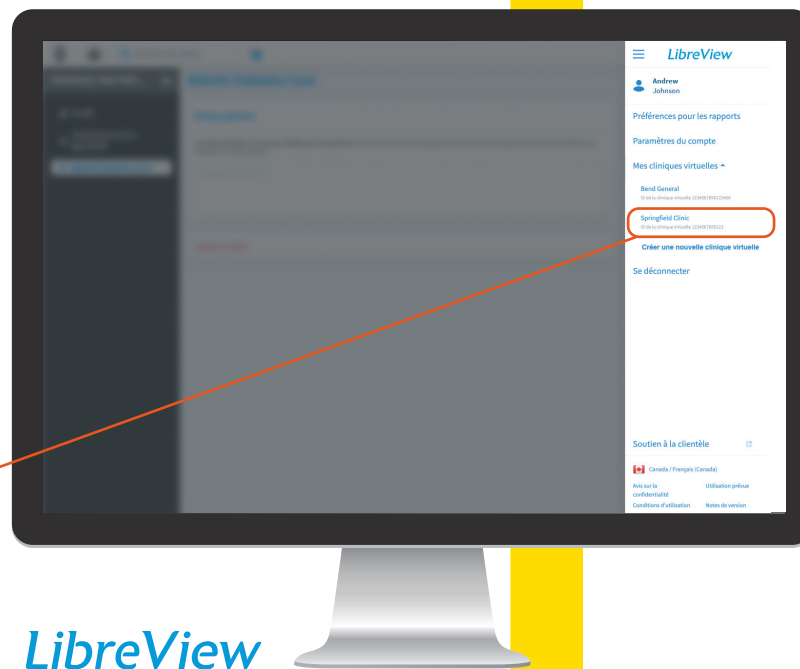

Les patients entrent l'identifiant
de clinique virtuelle dans l'appli
FreeStyle Libre 2 pour établir
la connexion



**Besoin d'aide? Appelez le Service à la clientèle
d'Abbott destiné aux professionnels de la santé au 1-844-610-1001
ou visitez la section « Soutien client » au www.LibreView.com**




VOUS POUVEZ LE VOIR

N'IMPORTE OÙ*, N'IMPORTE QUAND†

Les patients peuvent partager leurs données de glucose pour des conversations plus productives avec vous à distance

- Il est facile pour les patients de partager leurs données de glucose vers votre clinique virtuelle par l'intermédiaire de LibreView sans frais
- Les données de glucose sont automatiquement téléversées‡ de l'appli FreeStyle Libre 2 des patients vers LibreView et peuvent être téléversées manuellement du lecteur FreeStyle Libre 2
- Utilisez les rapports LibreView pour voir les schémas et les tendances de glucose de vos patients afin de soutenir une gestion efficace du diabète

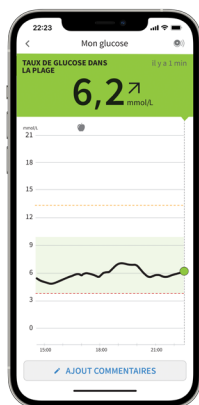

Recommandez l'appli FreeStyle Libre 2 et gardez facilement le contact avec vos patients grâce à LibreView


**FreeStyle
Libre 2**
SYSTÈME FLASH DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE


life. to the fullest.®
Abbott

* Le capteur est résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre (3 pieds) de profondeur. Ne pas l'immerger pendant plus de 30 minutes. Ne pas l'utiliser à plus de 10 000 pieds.

† Le capteur a besoin d'une période de réchauffement de 60 minutes lors de son application.

‡ L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 requiert l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.

© 2022 Abbott. FreeStyle, Libre, et les marques connexes appartiennent à Abbott. Les images des produits ne servent qu'à des fins de présentation. Les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

ADC-57524-F