



FreeStyle Libre 2

LibreView

Le rapport Aperçu de la tendance du taux de glucose vous donne un portrait complet de la gestion du diabète de vos patients

Au moyen de ce rapport sur la tendance du taux de glucose, LibreView vous aide à voir et à interpréter facilement les données relatives au taux de glucose de vos patients

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus qui vivent avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli.

Données recueillies par le système FreeStyle Libre. Le système FreeStyle Libre 2 possède les mêmes caractéristiques que le système FreeStyle Libre, avec alarmes optionnelles en temps réel liées au taux de glucose. Par conséquent, les données de l'étude sont applicables aux deux produits.

Les images ne servent qu'à des fins de présentation. Les données ne correspondent à aucun patient réel.



 **Abbott**
life. to the fullest.®


Une plateforme intégrée de solutions de santé numériques FreeStyle Libre pour une meilleure gestion du diabète



Les patients peuvent utiliser l'appli FreeStyle Libre 2* pour surveiller et partager facilement leurs taux de glucose



SURVEILLANCE FACILE¹

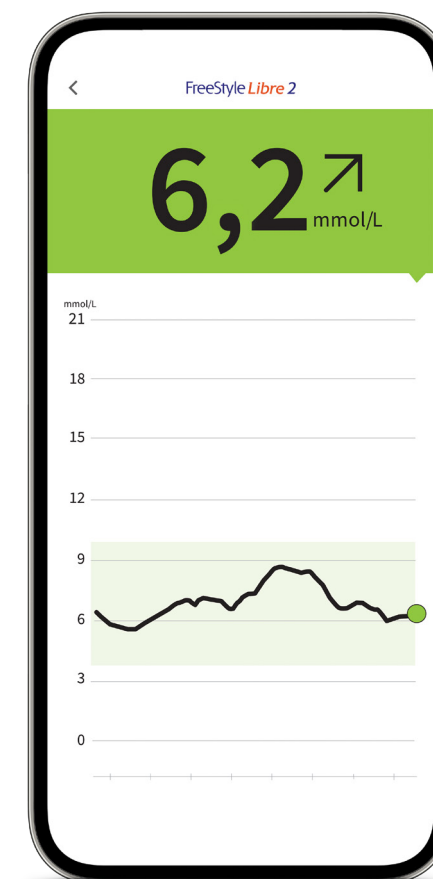

DONNÉES FACILES D'ACCÈS²



LibreView

Accès à distance et sur demande aux rapports de glucose pour découvrir les tendances et les schémas[†]

CONNEXION FACILE



LibreLinkUp

Pour une meilleure tranquillité d'esprit, vos patients peuvent partager leurs taux de glucose avec les membres de leur famille^{‡3}

* L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView.

† Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.libreview.com pour en savoir plus.

‡ L'appli LibreLinkUp est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site www.librelinkup.com pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation des applis LibreLinkUp et FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. L'appli mobile LibreLinkUp n'est pas prévue pour être l'outil primaire de surveillance du glucose : les utilisateurs à domicile doivent consulter leur(s) appareil(s) primaire(s) et consulter un professionnel de la santé avant de faire toute interprétation médicale et tout ajustement thérapeutique à partir de l'information fournie par l'appli.

1. Haak T., *Diabetes Ther.* (2017): <https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6> 2. Unger J., *Postgrad Med.* (2020): <https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393> 3. Campbell F., *Pediatr Diabetes.* (2018): <https://doi.org/10.1111/pedi.12735>

Les patients peuvent communiquer leurs données de glucose pour faciliter les rendez-vous virtuels ou en personne



FreeStyle Libre 2

Une fonction optionnelle de l'appli FreeStyle Libre 2 qui permet aux patients de communiquer facilement leurs données de glucose à leurs praticiens au moyen de la plateforme LibreView[†]

LibreView

Un flux de travail optimisé

Les données sur le glucose de vos patients sont automatiquement téléversées[‡] dans LibreView, un système infonuagique sécurisé[§]

CONNEXION À UNE CLINIQUE VIRTUELLE à l'aide de l'appli FreeStyle Libre 2*

* L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. † Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.libreview.com pour en savoir plus. ‡ L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles. § LibreView est certifié ISO27001/27018/27701 et HITRUST CSF.

Obtenez des données sur le glucose de vos patients, des téléversements faciles et un accès à distance, le tout avec LibreView*

LibreView* est une plateforme infonuagique sécurisée† qui vous offre, ainsi qu'à votre équipe de soins de santé, des rapports de glucose pour éclairer davantage vos décisions de traitement.



Téléversements faciles

Surveillez le glucose de vos patients à distance avec des données sur le glucose téléversées automatiquement‡ de l'appli FreeStyle Libre 2§ de vos patients




Accès à distance

Optimisez votre flux de travail avec accès aux rapports les plus récents à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet



Rapports conviviaux

Les rapports de glucose sont conçus pour être faciles à comprendre et pour refléter des recommandations d'experts pour vous aider à découvrir des tendances cachées

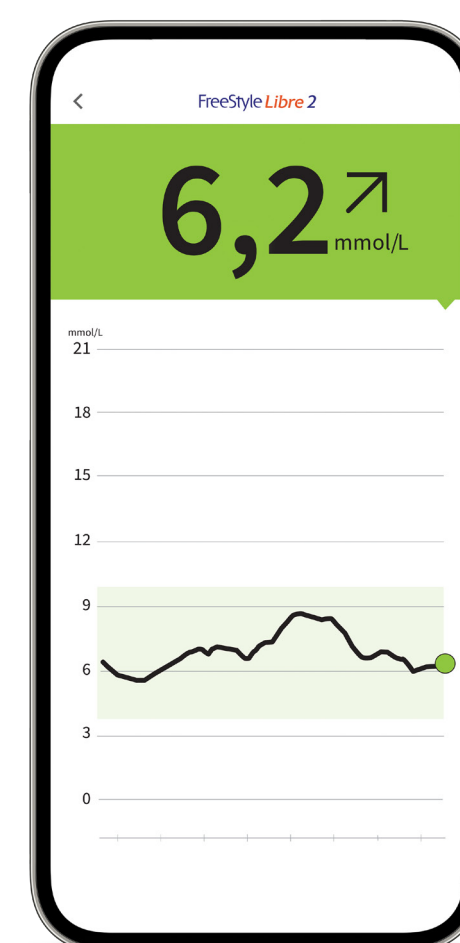

* Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.libreview.com pour en savoir plus. † LibreView est certifié ISO27001/27018/27701 et HITRUST CSF. ‡ L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles. § L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli.



Des interprétations orientées qui facilitent les consultations avec vos patients

Le rapport Aperçu de la tendance du taux de glucose vous donne des détails et des options de traitement et de médication personnalisées qui vous aident à gérer le diabète de vos patients.



Éléments que le médecin doit prendre en compte

Le logiciel LibreView* vous renseigne sur les changements de médication et d'habitudes de vie à envisager pour la tendance la plus importante de votre patient



La durée dans les plages et les statistiques de glucose sont des indicateurs de glucose généraux de vos patients et montrent où ils se situent par rapport aux recommandations du consensus international¹



Tendances du glucose
Le logiciel relève les tendances glycémiques de votre patient et met en lumière la tendance la plus importante durant la période du rapport

* Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.libreview.com pour en savoir plus.

1. Battelino T., *Diabetes Care*. (2019): <https://doi.org/10.2337/dci19-0028>

ÉTUDE DE CAS 1 : MARGARET

Tendance d'hyperglycémie avec épisodes d'hypoglycémie




Margaret

Diabète de type 2 traité avec metformine et insuline basale

1 Examiner la durée dans les plages et les statistiques de glucose

2 Examiner les éléments que le médecin doit prendre en compte pour déterminer la tendance la plus importante

3 Situer les tendances du glucose les plus importantes en contexte

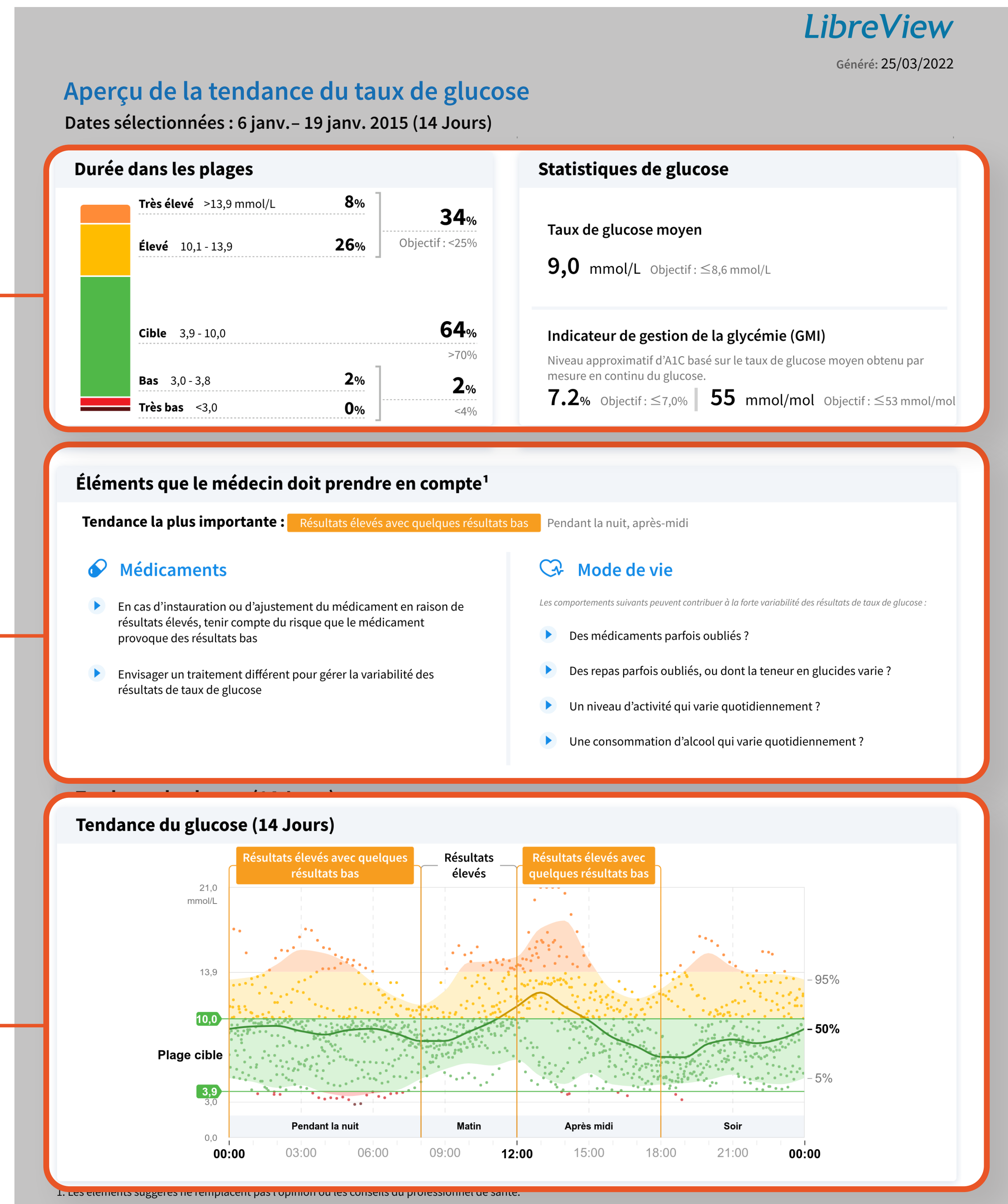

ÉTUDE DE CAS 1 : MARGARET

Voyez comment les mesures de glucose de Margaret se comparent aux recommandations des experts



Margaret

Diabète de type 2 traité avec metformine et insuline basale

1 Durée dans les plages et statistiques de glucose


- Cette section résume l'état glycémique général de votre patient, ce qui vous aide à déterminer le temps passé dans la plage cible, au-dessus ou en dessous
- Margaret a passé en moyenne 34 % de ses journées en hyperglycémie, ce qui est supérieur à la recommandation des experts de <25 %¹

Généré: 25/03/2022

Aperçu de la tendance du taux de glucose

Dates sélectionnées : 6 janv. – 19 janv. 2015 (14 Jours)

Durée dans les plages

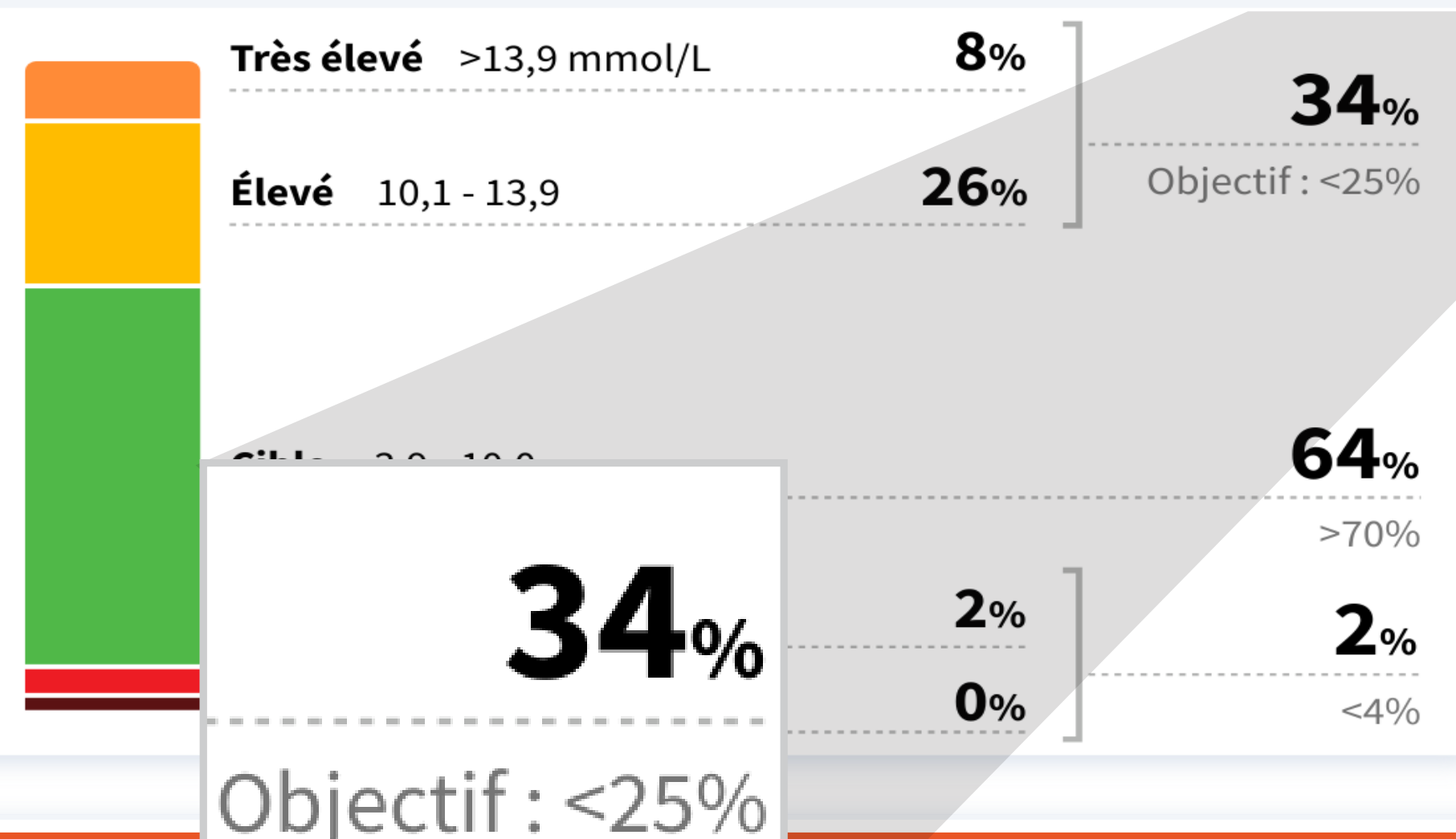

Statistiques de glucose

Taux de glucose moyen

9,0 mmol/L Objectif : ≤8,6 mmol/L

Indicateur de gestion de la glycémie (GMI)

Niveau approximatif d'A1C basé sur le taux de glucose moyen obtenu par mesure en continu du glucose.

7.2% Objectif : ≤7,0% | 55 mmol/mol Objectif : ≤53 mmol/mol

ÉTUDE DE CAS 1 : MARGARET

Personnalisez le traitement de Margaret en tenant compte des facteurs cliniques



Margaret

Diabète de type 2 traité avec metformine et insuline basale

2 Éléments que le médecin doit prendre en compte

- Le rapport propose automatiquement des changements de médication et de mode de vie à envisager, d'après la tendance de glucose la plus importante relevée
- Dans le cas de Margaret, il faut en priorité corriger les résultats élevés avec quelques résultats bas pendant la nuit et en après-midi, et des facteurs sont indiqués pour vous aider à gérer sa variabilité glycémique

Tendance la plus importante : Résultats élevés avec quelques résultats bas Pendant la nuit, après-midi

Médicaments

- ▶ En cas d'instauration ou d'ajustement du médicament en raison de résultats élevés, tenir compte du risque que le médicament provoque des résultats bas
- ▶ Envisager un traitement différent pour gérer la variabilité des résultats de taux de glucose

Mode de vie

Les résultats bas sont souvent associés à une forte variabilité des résultats de taux de glucose. Les comportements suivants peuvent contribuer à la variabilité des résultats de taux de glucose :

- ▶ Des repas parfois oubliés, ou dont la teneur en glucides varie ?
- ▶ Un niveau d'activité qui varie quotidiennement ?
- ▶ Une consommation d'alcool qui varie quotidiennement ?

ÉTUDE DE CAS 1 : MARGARET

Repérez facilement la tendance la plus importante de Margaret et le moment où elle a été détectée




Margaret

Diabète de type 2 traité avec metformine et insuline basale

3 Tendances du glucose

- Le graphique montre les tendances glycémiques de votre patient et met automatiquement **en lumière** la tendance glycémique la plus importante
- Dans le présent cas, vous pouvez voir les **résultats élevés avec quelques résultats bas**, détectés à la fois pendant la nuit et dans l'après-midi

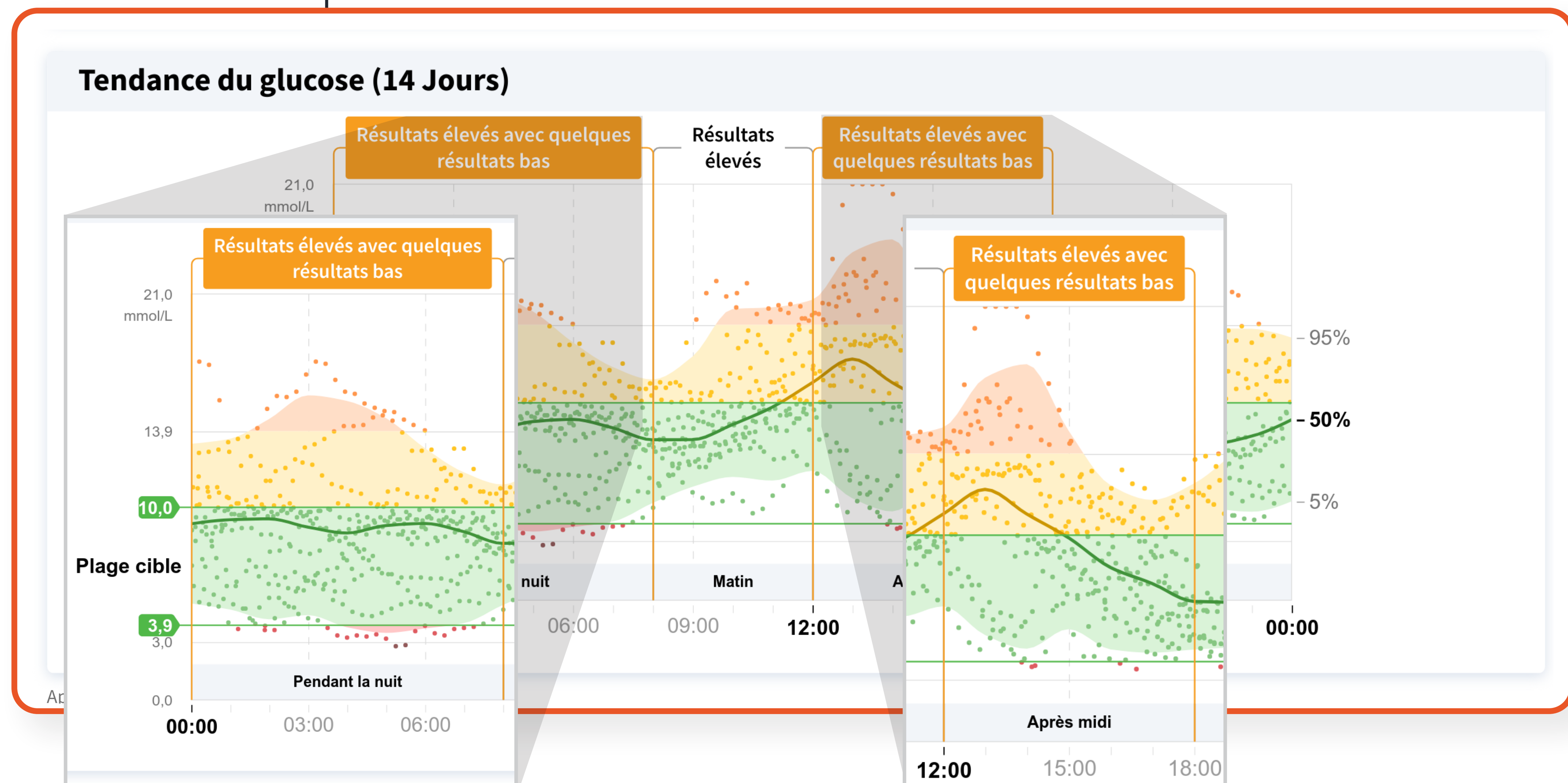

Tendance d'hypoglycémie




Marc
Diabète de type 1 traité par insulinothérapie basale et prandiale

1 Examiner la durée dans les plages et les statistiques de glucose

2 Examiner les éléments que le médecin doit prendre en compte pour déterminer la tendance la plus importante

3 Situer les tendances du glucose les plus importantes en contexte

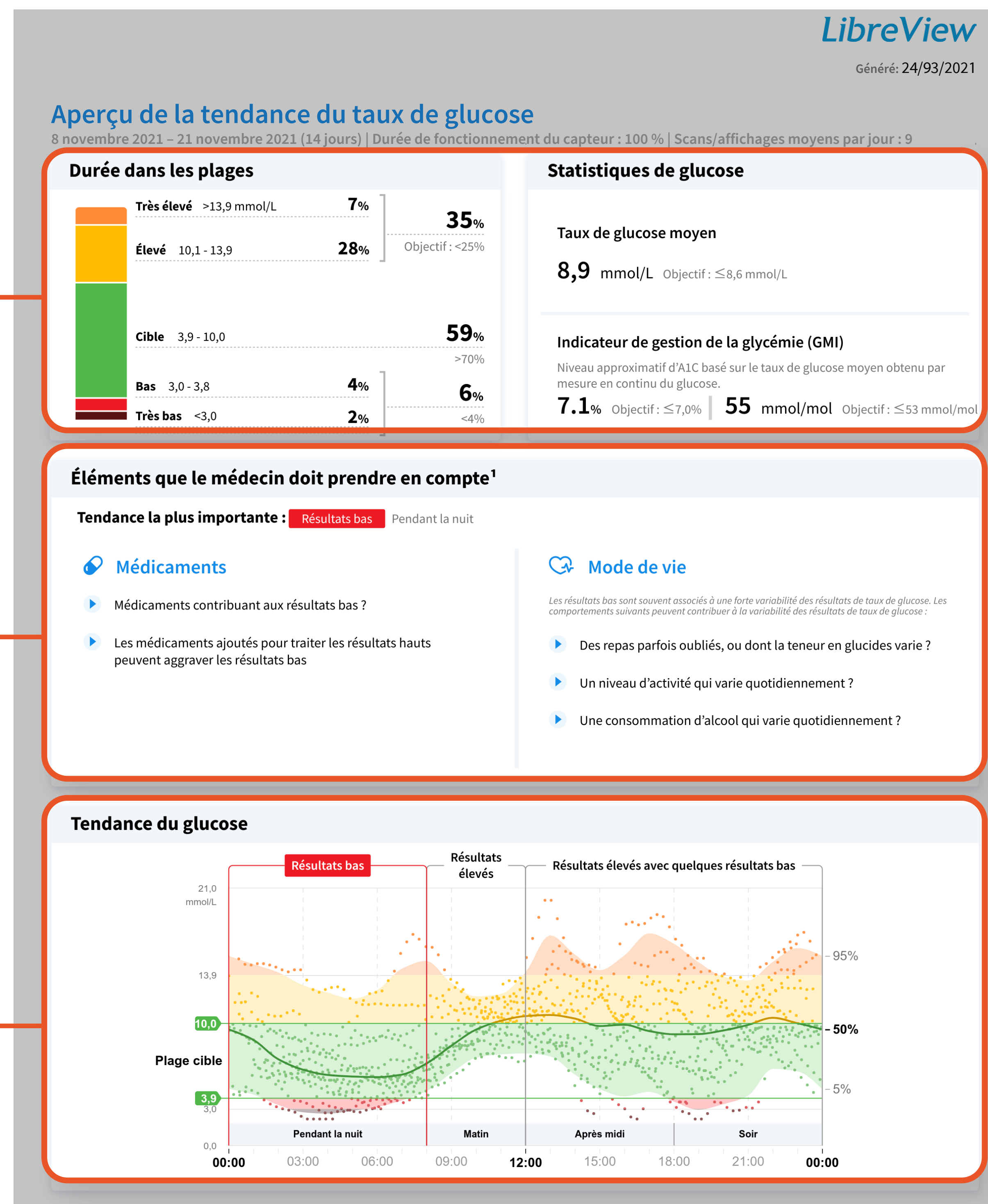

ÉTUDE DE CAS 2 : MARC

Voyez comment les mesures de glucose de Marc se comparent aux recommandations des experts




Marc

Diabète de type 1 traité par insulinothérapie basale et prandiale

1 Durée dans les plages et statistiques de glucose

- Cette section indique rapidement l'état glycémique général de votre patient, ce qui vous aide à déterminer combien de temps il a passé dans la plage cible, au-dessus ou en dessous
- Marc a passé en moyenne 6 % de ses journées en hypoglycémie, ce qui est supérieur à la recommandation des experts de <4 %¹

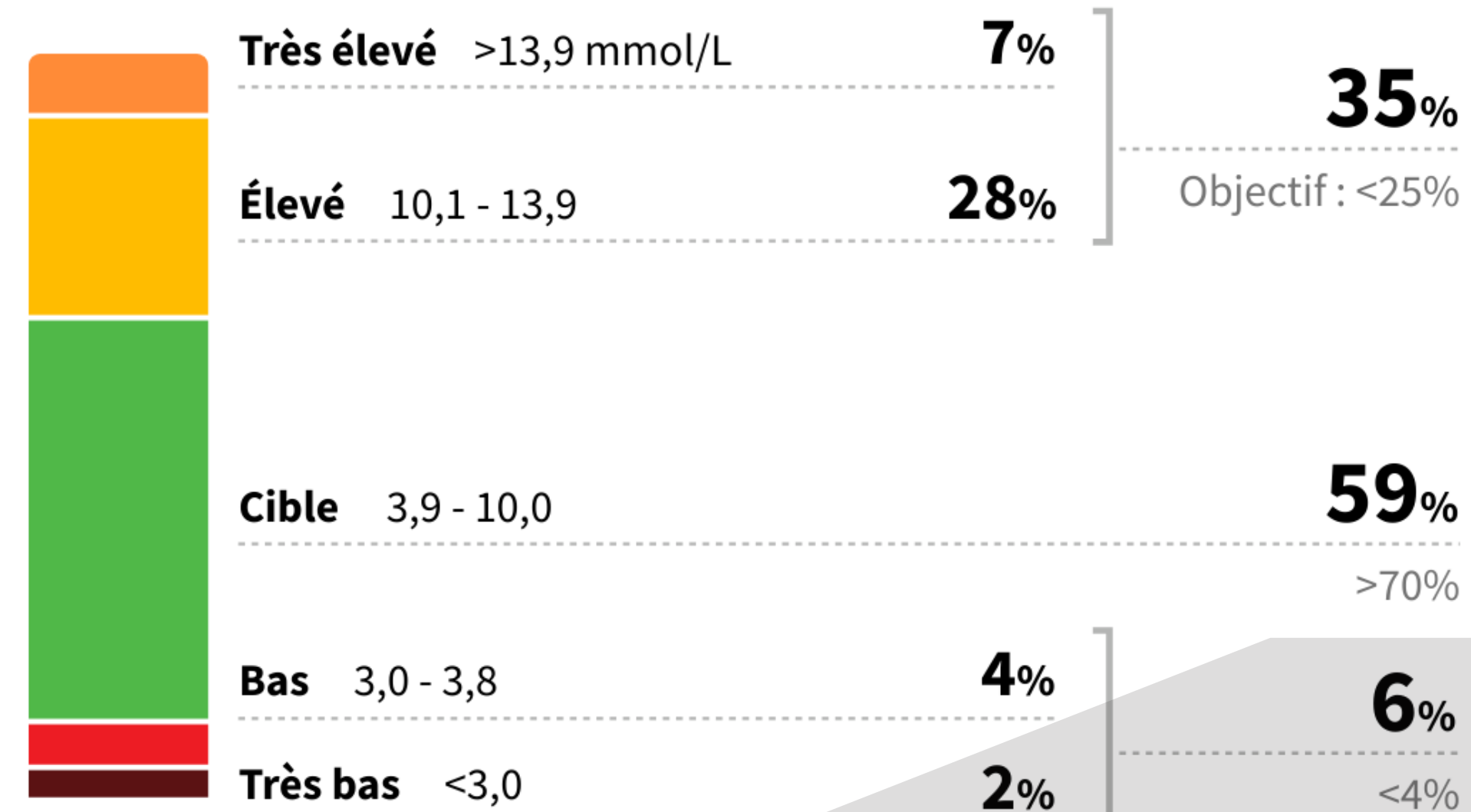

Taux de glucose moyen

8,9 mmol/L Objectif : ≤8,6 mmol/L

Indicateur de gestion de la glycémie (GMI)

Niveau approximatif d'A1C basé sur le taux de glucose moyen obtenu par mesure en continu du glucose.

7.1% Objectif : ≤7,0% | **55** mmol/mol Objectif : ≤53 mmol/mol

Éléments que le médecin doit prendre en compte¹

Tendance

6%

<4%

Résultats bas

Pendant la nuit

1. Battelino T., *Diabetes Care*. (2019); <https://doi.org/10.2337/dci19-0028>

ÉTUDE DE CAS 2 : MARC

Personnalisez le traitement de Marc en tenant compte des facteurs cliniques



Marc

Diabète de type 1 traité par insulinothérapie basale et prandiale

2 Éléments que le médecin doit prendre en compte

- Le rapport propose automatiquement des changements de médication et de mode de vie à envisager, d'après la tendance de glucose la plus importante relevée
- Dans le cas de Marc, la correction des **résultats bas** pendant la nuit est prioritaire, et des facteurs sont indiqués pour vous aider à personnaliser son plan de traitement

Tendance la plus importante : Résultats bas Pendant la nuit

Médicaments

- ▶ Médicaments contribuant aux résultats bas ?
- ▶ Les médicaments ajoutés pour traiter les résultats hauts peuvent aggraver les résultats bas

Mode de vie

Les résultats bas sont souvent associés à une forte variabilité des résultats de taux de glucose. Les comportements suivants peuvent contribuer à la variabilité des résultats de taux de glucose :

- ▶ Des repas parfois oubliés, ou dont la teneur en glucides varie ?
- ▶ Un niveau d'activité qui varie quotidiennement ?
- ▶ Une consommation d'alcool qui varie quotidiennement ?

ÉTUDE DE CAS 2 : MARC

Repérez facilement la tendance la plus importante de Marc et le moment où elle a été détectée




Marc

Diabète de type 1 traité par insulinothérapie basale et prandiale

3 Tendances du glucose

- Le graphique montre les tendances glycémiques de votre patient et met automatiquement **en lumière** la tendance glycémique la plus importante
- Dans le présent cas, des **résultats bas** ont été observés pendant la nuit

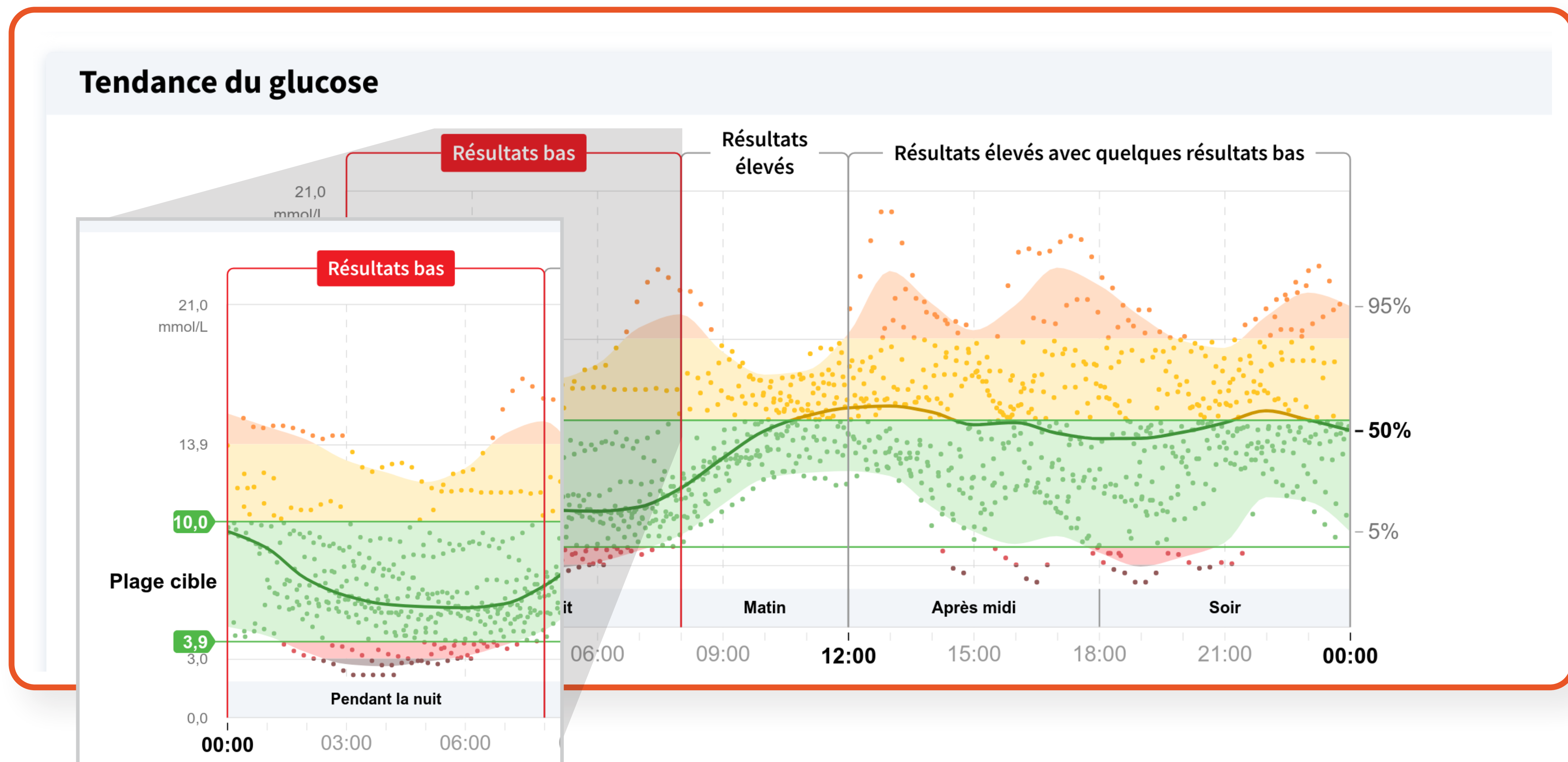

LibreView* vous aide à découvrir les schémas et les tendances des taux de glucose.



Le rapport **Aperçu de la tendance du taux de glucose** oriente l'interprétation et les options de traitement pour vous aider à gérer le diabète de vos patients

Visitez [LibreView.com](https://libreview.com)
pour en savoir plus



LibreView



Abbott
life. to the fullest.®

Les données ne correspondent pas à un patient réel, mais sont simulées à des fins d'illustration.

* Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.libreview.com pour en savoir plus.

© 2023 Abbott. Le boîtier du capteur, FreeStyle, Libre, et les marques connexes appartiennent à Abbott. ADC-61057-F v1.0