


FreeStyle
Libre 2



6,20 mmol/L

Se connecter à une clinique virtuelle avec LibreView*

Les patients peuvent facilement vous communiquer leurs données de glucose à distance pour tenir des conversations plus constructives sur la gestion du diabète

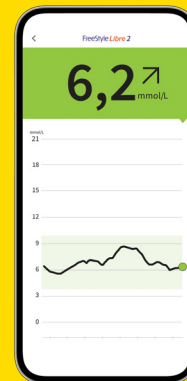

Maintenant, vous savez

LibreView

Abbott
life. to the fullest.®


Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus qui vivent avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli.

Données recueillies par le système FreeStyle Libre. Le système FreeStyle Libre 2 possède les mêmes caractéristiques que le système FreeStyle Libre, avec alarmes optionnelles en temps réel liées au taux de glucose. Par conséquent, les données de l'étude sont applicables aux deux produits.

* Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.libreview.com pour en savoir plus.

Les patients peuvent mesurer leur taux de glucose avec l'appli FreeStyle Libre 2*, et vous pouvez voir leurs données sur LibreView†

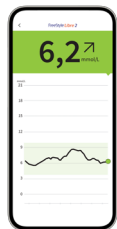

Pratique pour vos patients

Dans une seule appli intégrée, vos patients peuvent suivre leur taux de glucose simplement en jetant un coup d'œil à leur téléphone




LibreView



Pratique pour vous

Les données de glucose des patients sont automatiquement téléversées‡ du téléphone à LibreView† – pas besoin de personnel pour télécharger les données

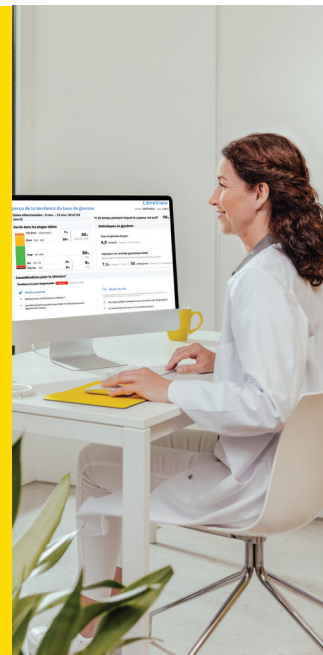

* L'appli FreeStyle Libre 2 et le lecteur FreeStyle Libre 2 ont des caractéristiques similaires, mais pas identiques. La réalisation d'un test par prélèvement au doigt est nécessaire en cas de non-concordance des symptômes ou des attentes avec les lectures du système. Le capteur FreeStyle Libre 2 communique avec le lecteur FreeStyle Libre 2 ou l'appli FreeStyle Libre 2 qui a servi à le démarrer. L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView.

† Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.libreview.com pour en savoir plus.

‡ L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.

Obtenez des données sur le glucose de vos patients, des téléversements faciles et un accès à distance, le tout avec LibreView*

LibreView* est une plateforme infonuagique sécurisée[†] qui vous offre, ainsi qu'à votre équipe de soins de santé, des rapports de glucose pour éclairer davantage vos décisions de traitement.



Téléversement facile

Les données de glucose sont automatiquement téléversées[‡] de l'appli FreeStyle Libre 2 des patients à LibreView



Accès à distance

Connectez-vous et consultez des rapports normalisés à partir de n'importe quel ordinateur branché à Internet



Sécuritaire et fiable

Les données sur le glucose sont accessibles en ligne, sans frais, dans un système infonuagique sécuritaire



Les graphiques ne servent qu'à des fins de présentation. Les données ne correspondent pas à un patient réel.

* Le logiciel de gestion de données LibreView est destiné à la fois aux patients et aux professionnels de la santé pour aider des personnes qui vivent avec le diabète et leurs professionnels de la santé dans l'examen, l'analyse et l'évaluation des données historiques du lecteur de glucose afin de soutenir une gestion efficace du diabète. Le logiciel LibreView ne vise aucunement à fournir des décisions d'ordre thérapeutique ni à remplacer les conseils d'un professionnel de la santé. Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.libreview.com pour en savoir plus.

† LibreView est certifiée ISO27001/27018/27701 et HITRUST CSF.

‡ L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.

Les patients peuvent utiliser l'appli FreeStyle Libre 2 pour vous envoyer facilement leurs données de glucose à distance




SE CONNECTER À UNE CLINIQUE VIRTUELLE à l'aide de l'appli FreeStyle Libre 2

La connexion à une clinique virtuelle est une fonction de l'appli FreeStyle Libre 2 qui permet aux patients de communiquer facilement leurs données de glucose à leurs praticiens au moyen de la plateforme LibreView




Un outil en ligne sécuritaire pour consulter les données de glucose des patients

Les données de glucose de vos patients sont automatiquement téléversées* dans LibreView, un système infonuagique qui vous donne un accès aux rapports sur demande

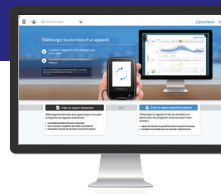

LibreView

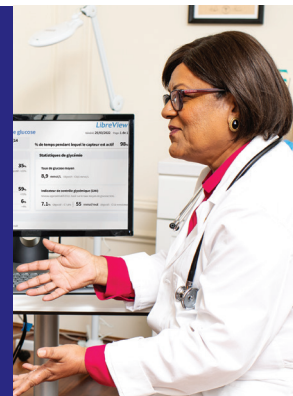

Connexion facile

Les patients peuvent lancer la connexion ou accepter une invitation de votre clinique virtuelle

Pratique pour vous

Une fois les patients connectés, leurs données de glucose sont automatiquement téléversées de l'appli FreeStyle Libre 2 à LibreView – pas besoin de personnel pour télécharger les données

Rendez-vous virtuels

Accès facile aux rapports de glucose pour des décisions de traitement plus éclairées et des échanges plus productifs



Les images ne servent qu'à des fins de présentation. Les données ne correspondent pas à un patient réel.

* L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.

Il est facile d'inviter les patients à partager automatiquement leur taux de glucose avec votre clinique

Option 1 : Inviter les patients à se connecter avec LibreView

1. Recherchez un patient ou cliquez sur l'icône « Ajouter un patient » en haut de la barre de navigation
2. Dans le profil du patient, sélectionnez Inviter le patient et utilisez l'adresse courriel associée à son compte
3. Les patients reçoivent leur invitation dans l'appli FreeStyle Libre 2 et par courriel

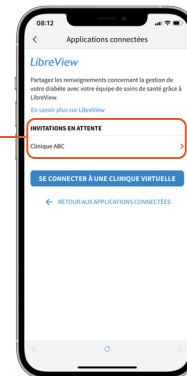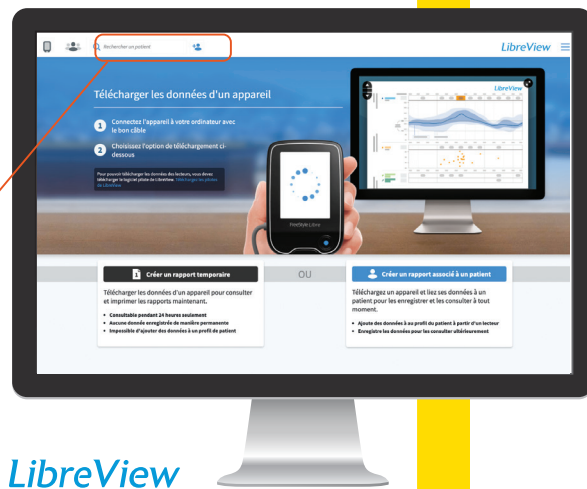

Les patients peuvent accepter leur invitation dans l'appli FreeStyle Libre 2 ou par courriel




Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'Abbott pour les professionnels de la santé, au 1 800 461 8481, ou visitez la section « Support » sur www.LibreView.com.

Donnez à vos patients l'identifiant LibreView de votre clinique virtuelle pour qu'ils puissent facilement activer le partage des données à partir de l'appli FreeStyle Libre 2

Option 2 : Les patients activent le partage des données avec votre clinique virtuelle

Fournissez à vos patients votre identifiant de clinique virtuelle, disponible dans LibreView sous « Mes cliniques virtuelles »

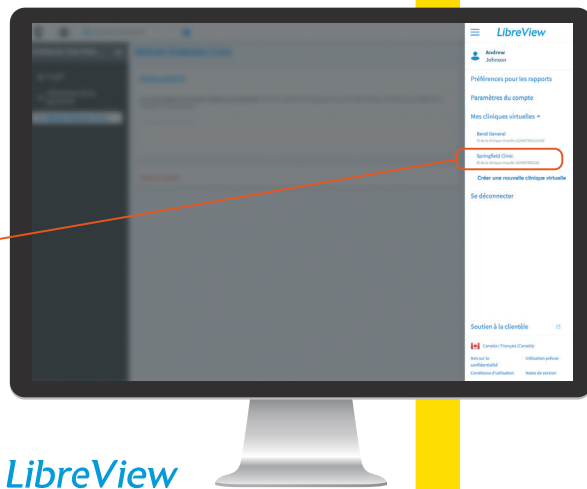

Ils pourront saisir l'identifiant dans l'appli FreeStyle Libre 2 pour se connecter à votre clinique virtuelle



Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'Abbott pour les professionnels de la santé, au 1 800 461 8481, ou visitez la section « Support » sur www.LibreView.com.

Une plateforme intégrée de solutions de santé numérique FreeStyle Libre pour une meilleure gestion du diabète



Les patients peuvent utiliser l'appli FreeStyle Libre 2* pour surveiller et partager facilement leurs taux de glucose



LibreView

Accès à distance et sur demande aux rapports de glucose pour découvrir les tendances et les schémas†



LibreLinkUp

Pour une meilleure tranquillité d'esprit, vos patients peuvent partager leurs taux de glucose avec les membres de leur famille‡

* L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView.

† Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d'exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.libreview.com pour en savoir plus.


‡ L'appli LibreLinkUp est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site www.librelinkup.com pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation des applis LibreLinkUp et FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. L'appli mobile LibreLinkUp n'est pas prévue pour être l'outil primaire de surveillance du glucose : les utilisateurs à domicile doivent consulter leur(s) appareil(s) primaire(s) et consulter un professionnel de la santé avant de faire toute interprétation médicale et tout ajustement thérapeutique à partir de l'information fournie par l'appli.

1. Haak T., *Diabetes Ther.* (2017); <https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6> 2. Unger J., *Postgrad Med.* (2020); <https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393>



Les patients peuvent vous communiquer leurs données de glucose à distance pour tenir des conversations plus constructives

- Vos patients peuvent facilement et gratuitement communiquer leurs données de glucose à votre clinique au moyen de la plateforme LibreView
- Les données sur le glucose sont automatiquement téléversées* de l'application FreeStyle Libre 2 du patient vers LibreView et peuvent également être téléversées manuellement à partir du lecteur FreeStyle Libre 2
- Utilisez les rapports LibreView pour suivre les tendances du glucose de vos patients afin de favoriser une gestion efficace du diabète

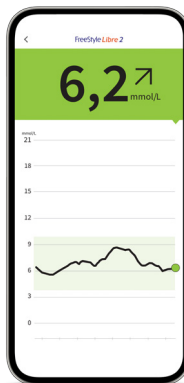



Recommandez l'appli FreeStyle Libre 2 et communiquez facilement avec vos patients au moyen de la plateforme LibreView

 **Abbott**
life. to the fullest.®

* L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 peut nécessiter l'inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.

© 2023 Abbott. Le boîtier du capteur, FreeStyle, Libre, et les marques connexes appartiennent à Abbott. ADC-57524-F v2.0