



# Conseils utiles sur le port du capteur

**POURQUOI VOUS PIQUER, QUAND VOUS POUVEZ SCANNER\*?**

Les capteurs collent mieux sur une peau propre, désinfectée et sèche avant l'application

## 1. LAVEZ

N'utilisez que des **savons sans parfum ni agent hydratant** pour laver la région sur laquelle vous appliquerez le capteur

## 2. DÉSINFECTEZ

Utilisez le tampon d'alcool fourni avec la trousse du capteur pour **enlever tout résidu huileux**

## 3. SÉCHEZ

**Laissez sécher votre peau entièrement avant d'appliquer le capteur**



### AVANT D'APPLIQUER LE CAPTEUR :

- Assurez-vous de choisir un site d'application approuvé — la partie supérieure arrière de votre bras
- Évitez d'utiliser de la lotion ou de la crème pour le corps sur la région où vous appliquerez le capteur, car ces produits peuvent laisser un résidu huileux sur votre peau
- Rasez les poils superflus, puisqu'ils peuvent rester pris entre l'adhésif du capteur et la peau



life. to the fullest.®

Abbott

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les adultes de 18 ans ou plus atteints de diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

\* La réalisation d'un test par prélèvement au doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie est nécessaire au moment des fluctuations rapides de la glycémie où le taux de glucose dans le liquide interstitiel ne reflète pas toujours exactement le taux de glucose sanguin, ou si le système indique une hypoglycémie ou l'imminence d'une hypoglycémie, ou en cas de non-concordance des symptômes avec les lectures faites par le système.

# Améliorez l'adhérence avec ces produits\*



## TORBOT SKIN TAC

[torbot.com](http://torbot.com)

Lingette nettoyante « collante »  
hypoallergène et sans latex



## LINGETTES PROTECTRICES SKIN-PREP

[smith-nephew.com](http://smith-nephew.com)

Favorise l'adhérence des adhésifs  
et des pellicules à la peau



## ADHÉSIF LIQUIDE MASTISOL

[eloquesthehealthcare.com](http://eloquesthehealthcare.com)

Liquide adhésif transparent non irritant  
qui permet aux pansements d'adhérer



## PROTECTEUR CUTANÉ NON IRRITANT CAVILON

[3m.com](http://3m.com)

Pellicule protectrice exempte  
d'alcool qui protège la peau contre  
les liquides corporels, les adhésifs  
et la friction



## TEGADERM I.V.

[3m.com](http://3m.com)

Film transparent qui  
renforce l'adhérence



## SURPANSEMENT

Adhésif de qualité médicale; pansement ou ruban adhésif. Lorsqu'un surpansement est utilisé, il doit être appliqué au moment de la mise en place du capteur. Il est important de retirer le surpansement uniquement à la fin de la période de port de votre capteur, étant donné que le capteur peut se décoller lors de son retrait. Assurez-vous de laisser l'ouverture ou le trou au centre du capteur à découvert pour le laisser respirer.

\* Cette liste n'est pas exhaustive et l'information qu'elle contient ne constitue nullement une recommandation du fabricant ni une attestation de la qualité du produit. Abbott Soins du diabète n'est pas responsable de l'exactitude et de l'intégralité des renseignements sur ces produits. L'accessibilité des produits peut varier selon le pays et la région. Veuillez suivre le mode d'emploi du fabricant pour chacun des produits. Les images des produits ne servent qu'à des fins de présentation.

# Conseils pour garder votre capteur en place



## PRENEZ GARDE

Faites attention à ne pas prendre votre capteur dans l'embrasure d'une porte, dans une portière ou dans une ceinture de sécurité, ou de le frapper contre les meubles



## TAPOTEZ POUR SÉCHER

Après une douche ou la baignade, épongez-vous délicatement avec la serviette pour éviter d'accrocher votre capteur ou de tirer dessus



## HABILLEZ-VOUS POUR LE SUCCÈS

Essayez de donner à votre capteur suffisamment d'espace pour respirer en portant des vêtements amples et légers



## RESTEZ VIGILANT DANS LA PRATIQUE DE SPORTS DE CONTACT ET DE L'EXERCICE INTENSE

Assurez-vous de choisir un site sur la partie supérieure arrière du bras qui réduira au minimum le risque de choc, et envisagez d'utiliser un surpansement et/ou tout article mentionné à la page précédente



## RALENTISSEZ

En vous habillant ou en vous déshabillant, faites attention à ne pas prendre vos vêtements sur votre capteur



## ÉVITEZ D'Y TOUCHER

En portant un capteur, évitez de jouer avec, de tirer dessus ou d'y toucher



life. to the fullest.™

Abbott